

JEDINEČNÝ test na detekci antigenů SARS-CoV-2 ze SLIN

V-CHEK™ 2019-nCoV Ag SALIVA RAPID TEST

Antigen test na ze slin (pouze vložení tamponu do úst)



JEDINEČNÁ, NEINVAZIVNÍ METODA VYŠETŘENÍ ANTIGENU SARS-COV-2

- unikátní, bezbolestný, šetrný a jednoduchý odběr
- hlavně vhodný pro seniory, děti, pro pacienty s kognitivními poruchami, Alzheimer centra
- vhodný pro každého, kdo má problém s výtěrem z nosohltanu



BEZ výtěru z nosohltanu
BEZbolestný odběr vzorku



Pouze vložení
tamponu do úst

95%


Přesnost více
než 95%



Jednokrokový test

| Vzorek | Výsledek | Balení |
|---------|----------|-----------------------------------|
| ze slin | 15 minut | 1 test nebo 1 balení / 20 testech |

| Kat. číslo | Balení |
|------------|----------|
| 0589C4X001 | 1 test |
| 0589C4X020 | 20 testů |

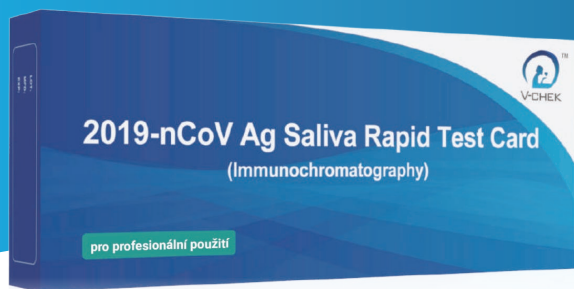

1 test obsahuje testovací kazetu a odběrový tampón



20 testů v balení

ANALÝZA POROVNÁVAJÍCÍ STUDIE

| 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test (Imunochromatografie) | Výsledky srovnávacího testu RT-PCR | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|
| | Positivní (+) | Negativní (-) | Celkem |
| Detekovaný jako Pozitivní | 110 | 2 | 112 |
| Detekovaný jako Negativní | 5 | 126 | 131 |
| Celkem | 115 | 128 | 243 |


Senzitivita:

95.65%, (95% CI: 90.22,98.13) 110/115


Specifická:

98.44%, (95% CI:94.48, 99.57) 126/128

POŽADAVKY NA VZOREK

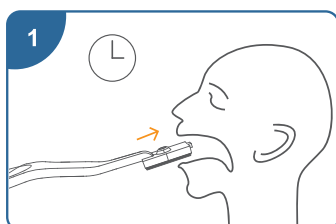


1. Vložte houbičku do úst a odběrový tampón ponechte v ústech nejméně 90 sekund, tak abyste zachytili ústní tekutinu (sliny).

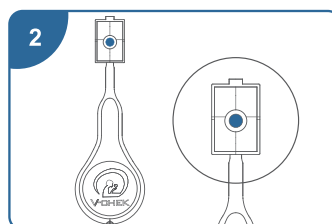

2. Jakmile se houbička plně nasatí a indikátor zmodrá, odstraňte tampón z úst.

POSTUP MĚŘENÍ

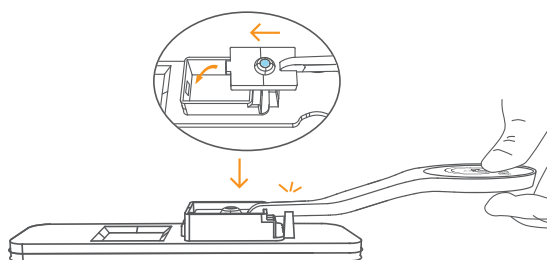

Vložte tampón do držáku testovací kazety a tampón zatlačte dolů.
Poznámka:


1. Konec tampónu musí být umístěn do otvoru držáku testovací kazety.
2. K testování je vhodný jakýkoli vzorek slin, ale doporučuje se použít vzorek slin odebraný ráno před vypláchnutím úst a před jídlem nebo pitím.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Odečtěte výsledek po 15 minutách

Méně než 15 minut může vést k falešně negativnímu výsledku.

Více než 15 minut může vést k falešně pozitivnímu výsledku.

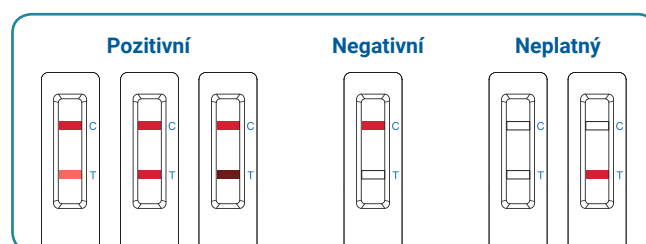

Veškerá sdělení mají pouze informační charakter, bez záruky správnosti jeho obsahu. QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. neručí za správnost obsahu z důvodu možných tiskových a redakčních chyb.



informace a objednávky:

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.
Korytná 47, 100 00 Praha 10
info@quickseal.eu

www.quickseal.eu
+420 273 167 580
quickseal.eu